



ZUBEREITUNG UND APPLIKATION

Kleinvolumige Chemotherapeutika

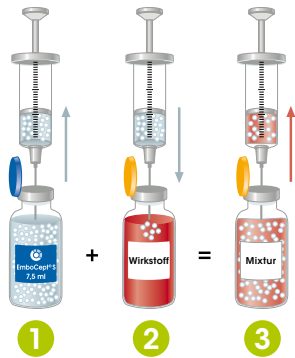


Applikation über ca. 30 Min.
unter permanenter
angiographischer Kontrolle
(ca. alle 10 Min.);
Mischung wiederholt schütteln, um
die Sedimentation zu verhindern.

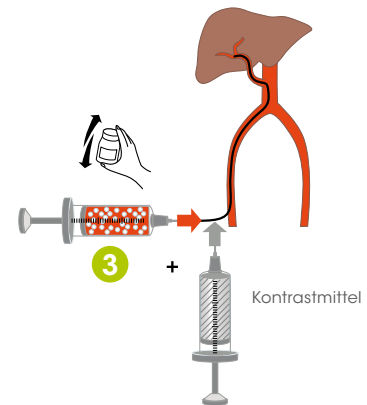


Dosierungsbeispiele

1 EmboCept®S	max. 7,5 ml	max. 7,5 ml
2 Wirkstoff	25ml Doxorubicin (50 mg) - Fertiglösung mit 2 mg/ml -	20ml Mitomycin (10 mg) - lösliches Pulver -
3 Mischung	32,5ml (EmboCept®S + Doxorubicin)	27,5 ml (EmboCept®S + Mitomycin)

Großvolumige Chemotherapeutika

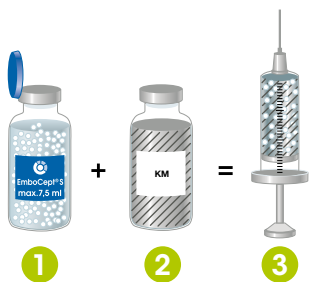

Applikation über ca. 60 Min.
beginnend mit der EmboCept®S-
KM-Mischung (ca. 2-3 ml);
Chemotherapeutika-Gabe mittels
Perfusor (100ml/Std.);
Rest der EmboCept®S-KM-Mischung
alle 10 Min. jeweils 2-3 ml unter
permanenter angiographischer
Kontrolle applizieren.

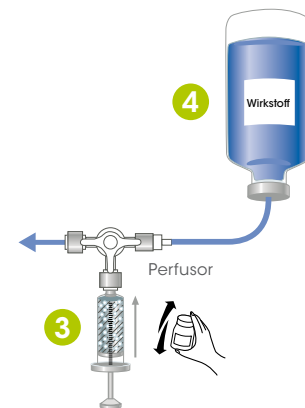

Dosierungsbeispiele

1 EmboCept®S	max. 7,5 ml	max. 7,5 ml
2 Kontrastmittel (KM)	max. 10 ml	max. 10 ml
3 Mischung	17,5 ml (EmboCept®S + Kontrastmittel)	17,5 ml (EmboCept®S + Kontrastmittel)
4 Wirkstoff	100ml Cisplatin (100 mg) - Fertiglösung mit 1 mg/ml -	50-70 ml Irinotecan - Fertiglösung/Konzentrat 20mg/ml -

EmboCept® S ist einfach und flexibel in der Zubereitung und Applikation und kann mit jeder Chemotherapie kombiniert werden.