


Gebrauchsinformation Blaseninstillationssystem AdriaCept® Lösung 50 mg Blasen-Instillations-Set Injektionslösung




Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation sorgfältig. Sie enthält wichtige Informationen, wie Sie das Blaseninstillationssystem in Kombination mit AdriaCept® Lösung 50 mg anwenden sollen. Beachten Sie außerdem die Gebrauchsinformation für das Arzneimittel AdriaCept® Lösung 50 mg Blasen-Instillations-Set Injektionslösung.

1. Blaseninstillationssystem


- A** Schutzkappe des Konnektors
- B** Konnektor
- C** Dosierkammer
- D** Schlauchklemme
- E** Rückschlagventil
- F** Luer-Lock-Anschluss
- G** Verschlusskappe für Luer-Lock-Anschluss
- H** Sicherheitsklemme für den Hahn
- I** Hahn
- K** Schutzkappe für Katheteranschluss

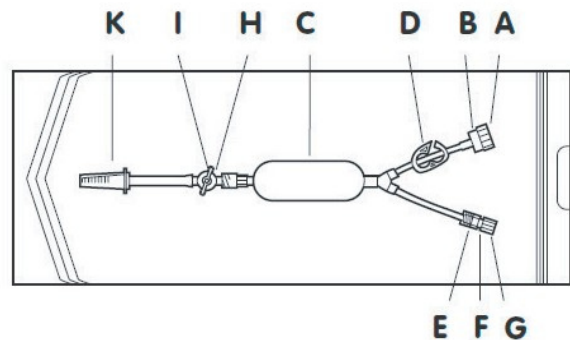


2. Die sterile Peelpackung öffnen, das Blaseninstillationssystem entnehmen und den beigegefügtten Entsorgungsbeutel bereitlegen.

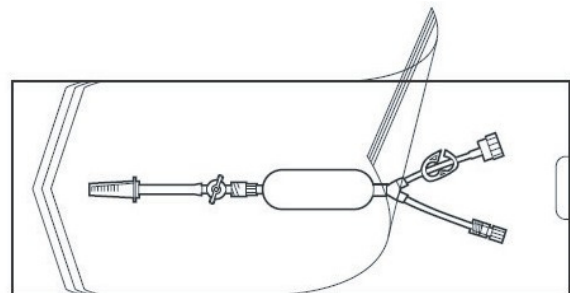


3. Die Schutzkappe (A) vom Konnektor (B) abziehen und die Flip-off-Kappe von der Flasche AdriaCept® Lösung 50 mg entfernen.

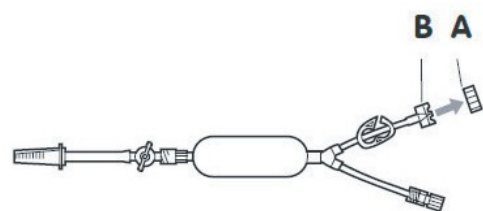


4. Die Flasche AdriaCept® Lösung 50 mg mittels Dorn des Konnektors (B) mit dem Blaseninstillationssystem in Verbindung bringen. **Dazu muss die Flasche auf einem festen Untergrund stehen.** Den Dorn des Konnektors danach kräftig und ohne zu verkanten **bis zum Einrasten** eindrücken.

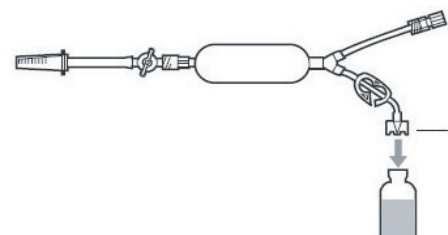

5. Die Durchstechflasche mit AdriaCept® Lösung 50 mg nach oben halten. Luft aus der Dosierkammer (C) des Blaseninstillationssystems vorsichtig in die Durchstechflasche pumpen, so dass die AdriaCept® Lösung 50 mg in die Dosierkammer (C) fließen kann. Diesen Vorgang bei Bedarf mehrfach wiederholen.

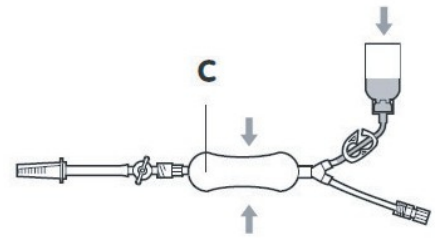


6. Die Schlauchklemme (D) des Blaseninstillationssystems durch Einrasten verschließen.

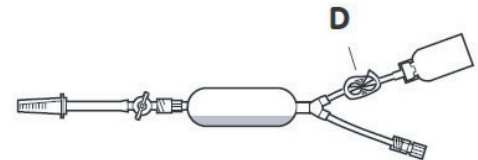


Soll ein Volumen von mehr als 25 ml instilliert werden, gehen Sie wie folgt vor. Ansonsten weiter wie unter 9. beschrieben.


7. Entfernen Sie die Verschlusskappe (G) vom Luer-Lock-Verschluss (F).

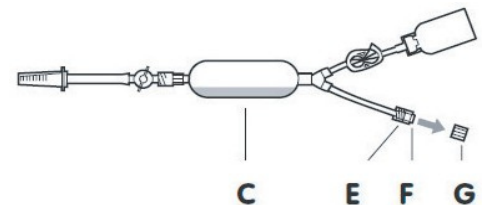

8. Injizieren Sie mittels Spritze die gewünschte Menge an physiologischer Kochsalzlösung in die Dosierkammer (C). Nach Entfernen der Spritze wird ein Rückfluss aus der Dosierkammer durch das Rückschlagventil (E) unterbunden.

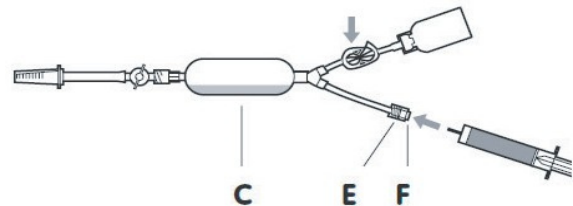

9. Entfernen Sie die Sicherheitsklemme (H) vom Hahn (I) und nehmen Sie die Schutzkappe (K) von der Spitze des Blaseninstillationssystem ab. Verbinden Sie die Spitze des Blaseninstillationssystem mit dem Katheteradapter. Durch Drehen des Hahns (I) stellen Sie die Verbindung zwischen Dosierkammer (C) und Blase her. Durch Druck auf die Dosierkammer (C) instillieren Sie die AdriaCept® Lösung 50 mg in die Blase.

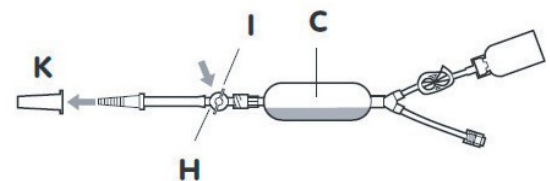

10. Nach der Instillation entfernen Sie den Katheter aus der Blase und geben ihn zusammen mit dem Blaseninstillationssystem in dem mitgelieferten Beutel, der mit dem Aufdruck „Sondermüll Zytostatika“ zu versehen ist, zur Entsorgung.

Hersteller Endfreigabe:
Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstr. 105 b
06406 Bernburg



PharmaCept GmbH
Bessemersstr. 82
12103 Berlin
Tel. (030) 75 65 98 50